

Obouvák A vyszouvak



Obouvák a vyszouvak ponožek jsou novinkami na trhu a mají široké zaměření pro lidi s různými zdravotními problémy.

Pomůcky jsou vhodné pro navlékání a sundávání všech druhů ponožek včetně silonových a speciálních lehkých kompresivních ponožek na křečové žíly.

Tyto pomůcky uvítají především lidé, kteří mají problémy s páteří, zády, kyčle-mi, kolena, klouby apod., dále lidé po úrazech, lidé trpící nadváhou, těhotné ženy a v neposlední řadě lidé staří.

Sami se přesvědčíte, jak snadno si s pomocí obouváku ponožky navléknete a s pomocí vyszouváku ponožky sundáte, zcela bez cizí pomoci, bez nutnosti ohýbání se nebo třeba jen pomoci jedné ruky.




„Obouvák a vyszouvak ponožek jsou praktické a jednoduché pomůcky, které usnadní život lidem s pohybovým onemocněním všech věkových kategorií. Ocení je nejen senioři s kloubním onemocněním chronického charakteru, ale i mladší lidé např. po úrazech nebo operacích meziobratlových plotének. Používat tyto pomůcky lze u všech diagnóz bez jakýchkoliv omezení.“



primář
MUDr. Radek Brauner
rehabilitační lékař, Brno

Postup nazouvání

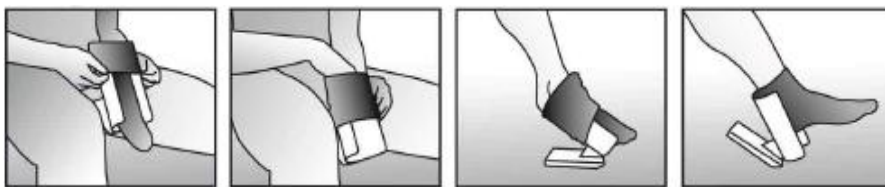

Obouvák přidržíme mezi stehny, poté ponožku položíme do prohlubně pomůcky, lem přehneme přes horní okraj obouváku. Ponožku přetáhneme přes celé tělo pomůcky směrem dolů tak, aby zůstala volná chodidlová část.

Pomůcku s ponožkou položíme na zem, nejlépe na koberec. Špičku chodidla zachytíme v ponožce a zasuneme dle potřeby do těla pomůcky. Pomůcku nastavíme kolmo na podložku (gumou dolů), poté chodidlo zatlačíme do ponožky. Došlápnutím patou dolů, špičkou nahoru na podlahu dojde k navlečení ponožky.

Postup vyszouvání



Pomůcku vezmeme do ruky a palec položíme do výřezu v rukojeti. Pomůcku zasuneme na lem ponožky (punčochy) a patu zasuneme do otvoru v pomůcce.

Po zasunutí paty do otvoru došlápneme na podlahu. Přishlápneme si pomůcku druhou nohou a nohu s ponožkou přitáhneme směrem k sobě, čímž dojde k svlečení ponožky.

Ponožka zůstane na pomůcce. Došlápneme na rukojet pomůcky dojde k jejímu vzpřímení i s ponožkou.

Obě pomůcky můžete rozebrat na dvě části.

Kompletaci výrobku a balné zajišťují místní chráněná dílna invalidů.

Naše pomůcky si můžete zakoupit na našich webových stránkách, případně objednat telefonicky nebo písemně.

V případě nespokojenosti garantujeme 14 denní lhůtu na vrácení peněz.

Naše pomůcky jsou patentově chráněny, můžete si je zakoupit pouze od nás, případně od našich smluvních obchodních partnerů.

Dbejte osobní bezpečnosti . Výrobek je vyroben PP polypropylenem